


SAM[®] Pelvic Sling II

RORACO hat's!
Ihr Spezialist für Notfallmedizin

SAM Pelvic Sling™ II

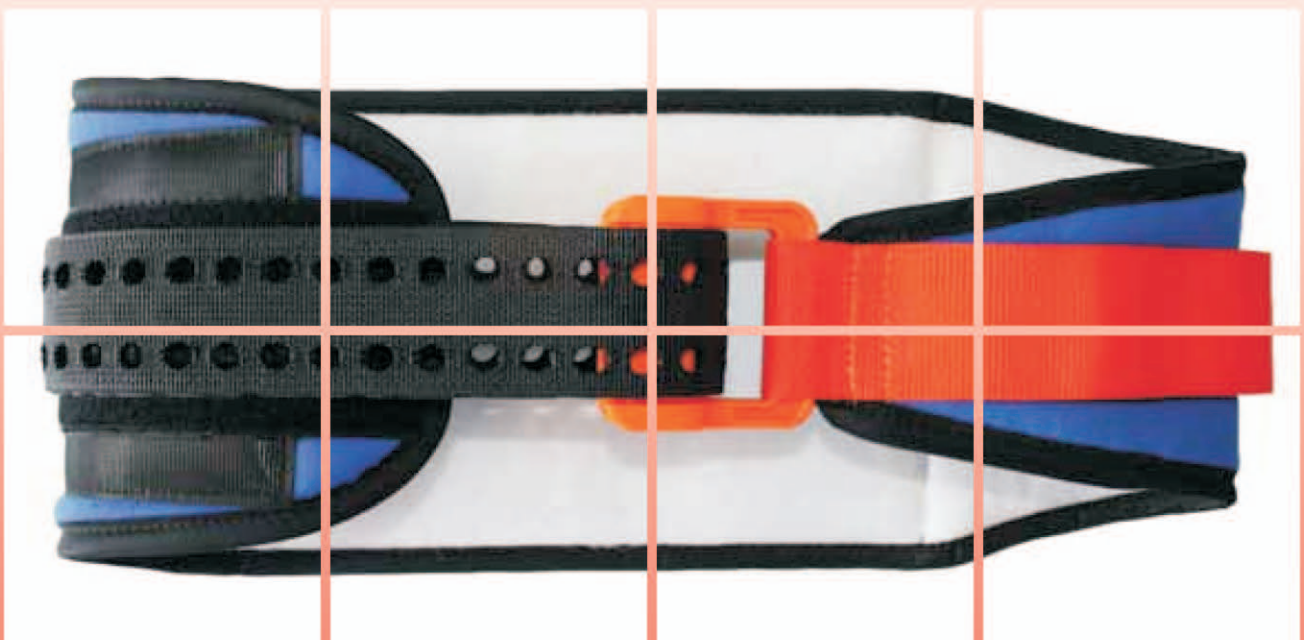

**DIE ideale und einfache Lösung
zur Stabilisierung von Beckenfrakturen**

RORACO Ges.m.b.H., A-1030 Markhofgasse 19
www.roraco.at, verkauf@roraco.at, Tel.: +43 (1) 310 58 68



Ihr Spezialist für Notfallmedizin


SAM Pelvic Sling II stabilisiert Beckenfrakturen und stoppt die Kompression zum richtigen Zeitpunkt

Die **SAM Pelvic Sling II** ist die erste und einzige umlaufende Beckenschiene welche entwickelt wurde, um offene Beckenbrüche wirksam und wohldosiert zu stabilisieren.

Sie wird von Notfallsanitätern und Militärärzten angewandt.

Die patentierte Auto-Stop Gürtelschnalle reduziert die Schmerzen, schwächt und stoppt die Blutung dank des wohl dosierten Drucks.

Die Gürtelschnalle verhindert auch, dass der Gurt zu fest gezogen wird, was sonst zu weiteren Schäden führen könnte.

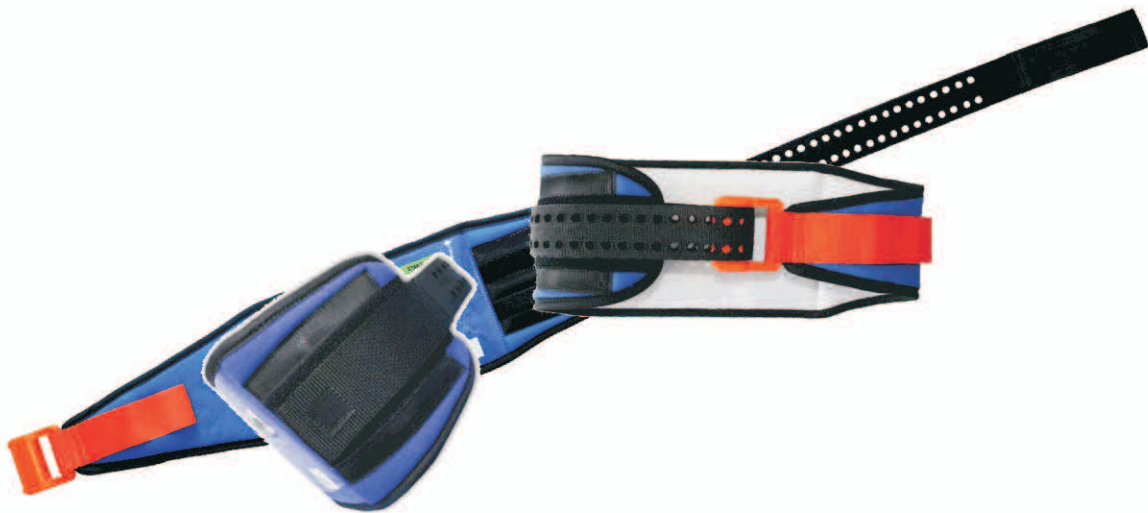

Neues, verbessertes Design


Die **Sam Pelvic Sling II** ist die Perfektion des ursprünglichen Originals und ist immer noch die einzige im Umlauf befindliche, kraftgesteuerte Beckenschiene. Wissenschaftliche Studien belegen die sichere und effektive Anwendung zur Stabilisierung von offenen Beckenfrakturen.

Sam Pelvic Sling II ist kompakt, einfach in der Handhabung und schnell anzulegen. Die "Standard"-Größe passt zu 98% der erwachsenen Bevölkerung. Es erfordert keine speziellen Kenntnisse um diese fachgerecht bedienen zu können.

Die Beckenschiene **Sam Pelvic Sling II** ist sehr robust und widerstandsfähig. Weder extreme Feuchtigkeit, noch höhere Temperaturen oder Kontakt mit harten bzw. spitzen Gegenständen können ihr etwas anhaben.

Die Vorteile des SAM Pelvic Sling II


- Wissenschaftlich und klinisch erprobt
- Qualitätsgetestet
- Gefahrlose und wirksame Kraftübertragung
- Röntgendurchlässig
- Einfache Anwendung
- Geringe Reibung
- Klares Feedback für die korrekte Anwendung durch "Click"
- Klettverschluss am Gurt und Schlinge für die einfache Befestigung
- Kein zu festes Anziehen möglich
- Wiederverwendbar
- Reinigung mit Standardreiniger oder antimikrobielle Lösungen

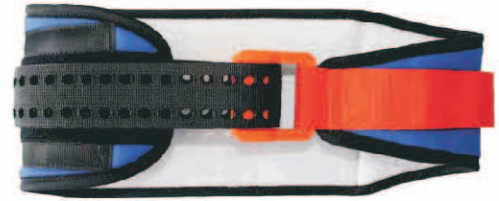

Auto-Stop Funktion

Die patentierte **Auto-Stop Schnalle** sorgt für die richtige Kompression. Die Schnalle ist so eingestellt, dass der Zug stoppt, sobald die richtige Druckkraft erreicht wurde.

Zwei Zapfen an der Schnalle stoppen den Gurt, was ein gut hör- und spürbares Klicken ("Click") verursacht.

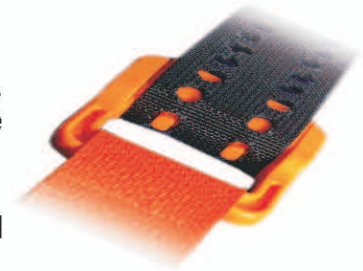

Handelsformen

Sam Pelvic Sling, Standard (81-127 cm)

Artikelnummer: s 0054


Sam Pelvic Sling, Extra Large (91-152 cm)

Artikelnummer: s 0055




Kurzanleitung zum Anlegen


Sam Pelvic Sling II ist in drei einfachen Schritten angelegt!

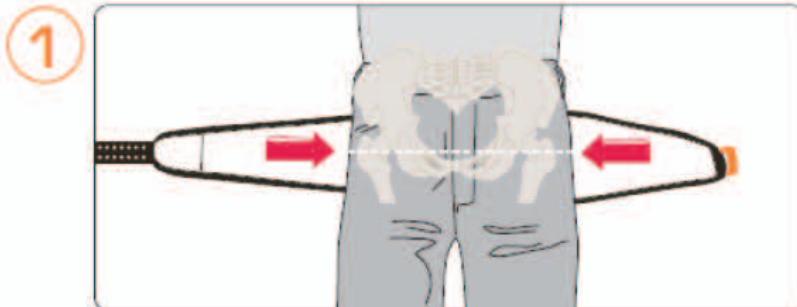

Entfernen von Objekten aus den Hosentaschen des Patienten. Sam Pelvic Sling II ausgebreitet und mit der Innenseite nach oben in Hüfthöhe unter den Patienten schieben.

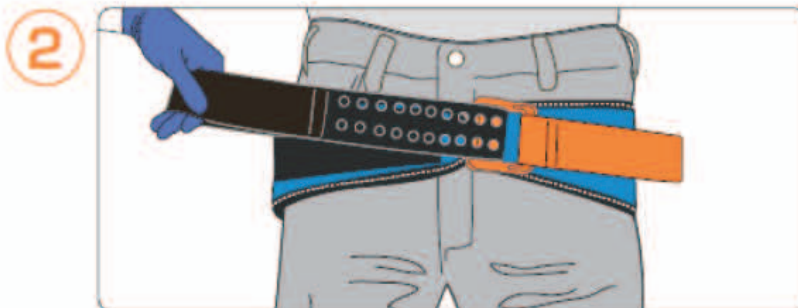

Schwarzen Gurt durch die Schnalle führen und kräftig anziehen.

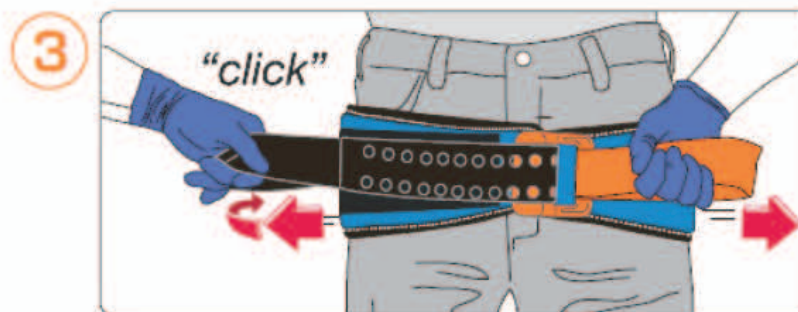

Orangenen Gurt halten und den schwarzen Gurt in entgegengesetzte Richtung ziehen bis ein deutliches Klicken hör- bzw. auch spürbar ist. Spannung halten und schwarzen Gurt an der Klettvorrichtung auf der Sam Pelvic Sling II fixieren.



RORACO ...

Ihr Spezialist für Notfallmedizin



RORACO Vertriebsgesellschaft
für den Sanitätsbedarf
in Behörden und Betrieben m.b.H.

Markhofgasse 19
A-1030 Wien

Tel: +43 (1) 310 58 68

Fax: +43 (1) 310 39 55

Email: office@roraco.at

Home: www.roraco.at

QM-System nach

ÖNORM EN ISO 9002
ÖNORM EN 46002
Zertifikat Nr. 98-VNA-AQ-020



Wenn etwas passiert, ... Wir helfen Ihnen!